

Zweckbestimmung V-Kerbzange ITDP-04

Ersteller

Tim Becker/ Jörg Halfmann

Diese Gebrauchsanweisung/ Zweckbestimmung gilt für folgende Zangenmodelle:

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Zweckbestimmung
NO-001-04	V-Kerb Zange in schwarz L/B/H 12 cm, 9,5 cm, 1 cm	Spezielle Zange zum Kerben einer „V-Form“ in einen Orthonyxiedraht bis zu einer Dicke von 0,4 mm

1. Zweckbestimmung der NORA V-Kerbzange (Art. Nr. NO-001-04)

Mit der V-Kerbzange für die Nora-Nagelkorrekturspange haben Sie ein präzises Spezialinstrument erworben. Diese Gebrauchsanweisung soll Ihnen einen Überblick darüber geben, wie Sie damit richtig umgehen.

Die V-Kerbzange ist dafür vorgesehen, eine „V-Form“ in den Orthonyxiedraht der Nora-Nagelkorrekturspange zu kerben. Die V-Kerbzange kann mit allen verfügbaren Härtegraden der Nora-Nagelkorrekturspange verwendet werden:

- Silber (weich)
- Bronze (mittelhart)
- Schwarz (hart)

Das gekerbte „V“ stellt im weiteren Verlauf der Applikation den Verbindungspunkt der beiden Spangenschenkel der Nora Nagelkorrekturspange dar. Es verleiht dem Draht mehr Flexibilität und dient aufgrund der genormten Größe des „V“ als Maß zur präzisen Einstellung der Zugkräfte.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch der NORA V-Kerbzange

Die Spitze des V's sollte immer in Richtung Nagelmatrix (nach proximal) zeigen. Daher ist es wichtig bei der Verwendung darauf zu achten, dass die Seite der Zange, welche die Kerbe besitzt, nach proximal gerichtet ist, wenn die „V-Form“ in den Orthonyxiedraht gekerbt wird.

Dokumentenbezeichnung	freigegeben/ Unterschrift Geschäftsführer	Seitenzahl
-----------------------	---	------------

Weiterhin ist es wichtig, dass das eingekerbte „V“ flach auf dem Nagel aufliegt. Hierzu achten Sie bitte darauf, dass die Zange senkrecht zur Nagelplatte ausgerichtet ist und der Draht unter leichter Spannung gehalten wird.

Insbesondere im Hinblick auf die Anwendung als Medizinprodukt, ist es besonders wichtig, bei der Applikation der Nora-Nagelkorrekturspange ausschließlich das originale Instrumentarium zu verwenden. So wird ein einwandfreies und wiederholgenaues Ergebnis gewährleistet.

Prüfen Sie vor jeder Verwendung der Zange, deren Zustand und ob evtl. Beschädigungen vorhanden sind. Sollten Beschädigungen sichtbar sein, verwenden Sie die Zange nicht mehr.

Die Zange ist für Orthonyxiedraht bis zu einer Stärke von 0,4 mm geeignet.

Bitte beachten Sie außerdem, dass bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und daraus resultierenden Schäden, die Haftung des Herstellers erlischt.

Hersteller Kontakt



Firma Halfmann / Wambeler-Holz 10 – 12 / 44328 Dortmund

Tel: 0231-99334268

E-Mail: info@joerghalfmann.de

<https://joerghalfmann.de>