

Gebrauchsinformation. Bitte aufmerksam lesen!

Medizinprodukt

Nora
Nagelkorrekturspange

Inhalt: Fünf Nora Nagelkorrekturspangen, einzeln sterilisiert verpackt

Zusammensetzung: Edelfederdraht 0,32 mm zur medizinischen Anwendung

Es handelt sich um ein Einmalprodukt.



Diese Gebrauchsinformation richtet sich an alle Angehörigen der Heilberufe (Fachkreise). Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachtet werden soll.

Was ist die Nora Nagelkorrekturspange und wofür wird sie angewendet?

Die Nora Nagelkorrekturspange ist eine zweiteilige Edelfederdrahtspange, welche zur Korrektur der Nagelplatte eingesetzt werden kann.

Die Nora Nagelkorrekturspange soll die transversale Krümmung des Nagels in seinen Ursprung zurückführen, vor Rezidiven – nach operativen Eingriffen – schützen und prophylaktisch eingesetzt werden, um eine übermäßige (krankhafte) transversale Krümmung der Nagelplatte vorzubeugen.

Wie wird die Nora Nagelkorrekturspange angewendet?

Die Nora Nagelkorrekturspange ist nicht für den Privatgebrauch gedacht und soll nur durch speziell geschultes Fachpersonal wie z. B. Arzt/Ärztin, Heilpraktiker*in oder Podologe*in durchgeführt werden.

Was ist bei der Anwendung der Nora Nagelkorrekturspange zu beachten?

- Die Anwendung der Nora Nagelkorrekturspange ersetzt nicht den Besuch eines Arztes/einer Ärztin. Die Ursache der Nagelveränderung sollte gegebenenfalls vor der Anwendung der Spange durch einen Arzt/eine Ärztin abgeklärt werden.
- Bei langanhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden sowie bei Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen beenden Sie sofort die Anwendung.
- Die Anwendungsdauer der Nora Nagelkorrekturspange ist abhängig von der Zweckbestimmung, der Anwendung.
- Die Nora Nagelkorrekturspange sollte nur von geschultem Fachpersonal entfernt werden um etwaige Schäden an der Nagelplatte zu vermeiden.
- Einmal angelegte Spangen bitte nicht wiederverwenden.

Wofür eignet sich die Nora Nagelkorrekturspange? (Indikation)

- Konservative Nagelkorrekturmaßnahme bei folgenden Nagelveränderungen: Unguis convolutus, Unguis incarnatus Stadium 1a bis 2b
- Nachsorge, nach einer Entfernung/Teil Entfernung eines Nagels (Rezidivprophylaxe)
- Prophylaktisch, nach einer erfolgreich durchgeführten Nagelkorrektur, wenn das Grundproblem bestehen bleibt (z. B. Zehen-/ Fuß-Fehlstellung)
- Onychophosis (übermäßige Verhornung in der Nagelfalz)
- Clavus in der Nagelfalz
- Subunguales Hämatom

Wann sollte die Nora Nagelkorrekturspange nicht angewendet werden?

- Bei bestehender Überempfindlichkeit gegenüber dem Material
- Bei malignen (bösartigen) Erkrankungen im Anwendungsbereich
- PAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit)
- Onychotrophie (Längen – und Dickenwachstum Verzögerung)
- Onycholyse (Ablösung des Nagels vom Nagelbett)
- Bei Nagelmykose, die mehr als 2/3 des Nagels betrifft
- Pachyonychie (Entwicklungsstörung des Nagelbetts)
- Onychorrhaxis / Onychoklasie (brüchiger Zerfall der Nagelplatte in Längsrichtung)
- Beau-Reil-Querfurchen (transversal verlaufende Querfurchen)

- Onychomadese (kompletter Nagelverlust)
- Trachyonychie (Sandpapiernägel)
- Onychodystrophie (Farbe, Form, Konsistenz und Wachstums des Nagels können verändert / gestört sein)
- Onychogryposis (Klauennagel, verdickte Nagelplatte, verdrehte Nagelplatte)
- Kolionychie (Hohlnagel / Löffelnagel)
- Psoriasis der Nagelplatte
- Bei Entzündungen im Anwendungsbereich

Anwendungsdauer:

- Bis der Nagel seine gewünschte, schmerzfreie Form erreicht hat
- Es ist möglich, dass im Behandlungsverlauf mehrere Nora Nagelkorrekturspangen eingesetzt werden müssen, um den Behandlungserfolg zu erreichen
- Je nach Ausprägung der Nagelplatte: ein bis mehrere Monate
- Kontrolle der Nora Nagelkorrekturspange nach Ermessen des Behandlers jedoch mindestens alle 4–8 Wochen

Gegenanzeigen:

- Schmerzen im Anwendungsbereich
- Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Hautreizungen oder extreme Rötungen)
- Entzündungen im Anwendungsbereich
- Lyse des Corpus unguis
- Verletzungen des Corpus unguis (z. B. Riss, Delle)

Hier sollte die Anwendung direkt beendet werden.

Mögliche Nebenwirkungen:

Sehr selten kann es zu:

- Überempfindlichkeit gegenüber dem angewendeten Material
- leichte Druckschmerzen
- Schwellung, Rötung, Entzündung
- Bluterguss
- Weißfärbung des Nagels durch Ablösung der Nagelplatte

kommen.

Lagerungshinweis:

Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zwischen 5 und 25°C lagern.
Medizinprodukt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Stand der Information: Januar 2024



Hersteller
MPC INTERNATIONAL S.A.
26, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG
Luxemburg

Vertrieb
Firma Halfmann
Wambeler Holz 10-12
44328 Dortmund
Fon: +49 (0) 231-99 33 42 68
E-Mail: info@nora-spange.de
www.nora-spange.de

Weitere Informationen:

